



LipiVage[®] 200-5

Geschlossene Einmalsysteme für Gewinnung,
Aufbereitung und Transfer von Eigenfett

POLYTECH
health & aesthetics 

LipiVage® 200-5, CE 0470

Geschlossene Einmalsysteme für Gewinnung, Aufbereitung und Transfer von Eigenfett

LipiVage® ist ein einfach anzuwendendes, effizientes Fettzellen-Aufbereitungssystem, das die Gewinnung einer großen Anzahl viabler Fettzellen für langanhaltende Ergebnisse ermöglicht.

Produktbeschreibung

LipiVage® wird als gebrauchsfertiges, steriles Einmalprodukt geliefert. Das System ermöglicht eine schonende Fettzellen-Gewinnung unter kontrollierten Bedingungen. Durch die Verringerung des angelegten Vakuums haben die gewonnenen Eigenfettzellen eine hohe Viabilität.

LipiVage® ist mit einem universellen Schlauchverbinder ausgestattet, wodurch verfügbare Standardschlauchsysteme verwendet werden können und das System direkt an die Liposuktionspumpe angeschlossen werden kann. Die mitgelieferte Aspirationskanüle wird mit einem einrastenden Drehverschluss angeschlossen, der eine stabile Verbindung herstellt. Die Anordnung der Saugöffnungen in der Kanüle sichern ein konstantes Vakuum während des Arbeitsgangs, auch wenn direkt unter der Haut abgesaugt wird.

Durch den integrierten Filter werden die Fettzellen in der Kanüle von Ölen und Gewebsflüssigkeiten getrennt. Mit Hilfe des mitgelieferten Transferkonnektors ist die sterile Portionierung in Spritzen kleinerer Volumina zur Reinjektion möglich.

Die Gewinnung von Eigenfett zur Reinjektion mit LipiVage® hat gegenüber der klassischen Zellgewinnung und Aufbereitung mittels Zentrifuge folgende Vorteile:

- einfache Handhabung und Zeitersparnis durch Fettgewinnung und Aufbereitung in einem Arbeitsgang
- steriles, geschlossenes Einmalsystem, keine Sterilisierung erforderlich
- hohe Zellviabilität durch die Anwendung eines geringeren Absaugvakuums und die nicht erforderliche Zentrifugierung
- konzentrierte, gereinigte Fettzellen durch Abfiltration von Flüssigkeiten und Ölen sofort verfügbar

Materialangaben

Bestellnummer	Beschreibung
LipiVage® Einmalsysteme	
LipiVage® 200-5	5er-Pack sterile Einmalsysteme zur Gewinnung von bis zu 200 ml reinjizierbarem Fett, inkl. Aspirationskanüle und Transferadapter

Wichtige Informationen

Im Lieferumfang von LipiVage® 200-5 enthalten sind 5 einzeln und steril verpackte LipiVage® Systeme, jedes mit Aspirationskanüle und Transferadapter.

Achtung: Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen, die jedem System beiliegen.



Literatur:

- 1) Gottlieb W., MD: Facial Fat Grafting. Emedicine, 21 June 2002
- 2) Puckett C, MD and Becker B, MD: Discussions in Search of Improved Fat Viability. Plastic and Reconstructive Surgery, Vol. 113, No.1 January 2004
- 3) Chajchir A, Benzaquen I and Moretti E: Comparative Experimental Study of Autologous Adipose Tissue Processed by Different Techniques. Aesthetic Plastic Surgery. 1993 Spring; 17(2): 113-5

Information und Vertrieb:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Deutschland

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com



Hersteller:

LipiVage™ wird hergestellt von Genesis Biosystems, Lewisville, USA