

System zur Korrektur der Ohrmuscheln im Säuglingsalter

Mehrere US- und internationale Patentanmeldungen

Gebrauchs- und Pflegeanleitung für Eltern



Diese Informationen tragen dazu bei, bei der Behandlung Ihres Kindes mit EarWell™ optimale Therapieergebnisse zu erzielen.

Bitte lesen Sie sich alle Informationen durch und befolgen Sie diese genau.

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
Ihr behandelnder Arzt hat bei Ihrem Kind das EarWell™-System zur Ohrenkorrektur angewendet. Am Ende der Behandlung werden die Ohren Ihres Kindes voraussichtlich normal geformt sein.

Während der Behandlung müssen Sie einige Dinge beachten, um die Ergebnisse der EarWell™-Anwendung zu verbessern.

› www.earwell.eu

› office@bondimed.at

Ihr behandelnder Arzt:



Zugunsten der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Begriffe verzichtet und die männliche Form angeführt. Gemeint und angesprochen sind immer beide Geschlechter in gleicher Form.

becon
PREMIUM MEDICAL DEVICES

www.earwell.eu


bondimed

Vertrieb:
Bondimed Aesthetics GmbH
Unterthalhamstraße 2
A-4694 Ohlsdorf

Kontakt:
Telefon: +43 7612 204 55
Fax +43 7612 203 55
office@bondimed.at
www.bondimed.at

Klebehaftung

EarWell™ wird mit einem speziellen medizinischen Klebeband an der Haut Ihres Kindes befestigt. Es sorgt für optimalen Halt und schützt vor Verletzungen. Es hält das EarWell™-System sicher an Ort und Stelle für etwa 14 bis 17 Tage.

Täglich überprüfen!

Überprüfen Sie das Gehäuse täglich, um sicherzustellen, dass es noch fest an der Haut haftet. Wenn Sie bemerken, dass sich das Klebeband des Gehäuses von der Haut löst, rufen Sie bitte bei Ihrem behandelnden Arzt an und vereinbaren Sie einen Termin. Bei diesem Termin wird dann ein neues EarWell™-Gehäuse angelegt.

Provisorisch kleben

Nachdem Sie mit Ihrem behandelnden Arzt einen Termin vereinbart haben, verwenden Sie das Klebeband, das Sie von Ihrem behandelnden Arzt bekommen haben, um das EarWell™-System provisorisch an der Haut zu befestigen. Schneiden Sie ein kleines Stück Klebeband von der Rolle ab (etwa 7–8 cm) und befestigen Sie es an der Oberseite des EarWell™-Systems und anschließend an der Haut Ihres Kindes. Sollte der Bereich der Ablösung breiter als das Klebeband sein, verwenden Sie bitte zur Befestigung zusätzliche Streifen Klebeband.

In einigen Fällen kann es zu einer vorzeitigen Ablösung eines oder beider EarWell™-Gehäuse von der Haut kommen. Dies kann passieren, wenn das Kind ungewohnt aktiv oder unruhig ist und heftige Arm- und Schulterbewegungen macht. Wenn Sie eine solche Ablösung bemerken, verwenden Sie das Klebeband in der oben beschriebenen Weise, um das System an der Haut zu befestigen.

Termin vereinbaren!

Setzen Sie sich mit Ihrem behandelnden Arzt in Verbindung, nachdem Sie das EarWell™-System mit Klebeband befestigt haben.

Löst sich das gesamte EarWell™-System oder mehr als 50%, versuchen Sie bitte NICHT, es wieder festzukleben. Vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit Ihrem behandelnden Arzt.

Beachten Sie bitte, dass eine vorübergehende Ablösung des EarWell™-Systems, keine Auswirkungen auf die Behandlungsergebnisse oder -dauer hat.

Reinigung

Trocken halten!

Die Klebeverbindung ist für den Halt des EarWell™-Systems unabdingbar, daher muss es so trocken wie möglich gehalten werden.

Sie sollten das EarWell™-System von Feuchtigkeit fernhalten und nicht versuchen, es zu waschen.

Rötung

Um die Sicht auf das Ohr zu gewährleisten, ist das EarWell™-System aus einem durchsichtigen Material hergestellt. Wenn das Ohr eine ungewöhnliche Rötung aufweist, teilen Sie dies bitte dem behandelnden Arzt mit.

Pflege des Systems

Sauber halten!

Sorgen Sie dafür, dass das Innere des Gehäuses nicht mit Milch, Säuglingsnahrung oder Erbrochenem in Berührung kommt. Sollte eine dieser Flüssigkeiten in das Innere des Gehäuses eindringen, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit dem behandelnden Arzt. Er wird die obere Abdeckung entfernen und das Ohr und die EarWell™-Komponenten reinigen.

Entfernung der Abdeckung nur vom Arzt

Die obere Abdeckung des EarWell™-Systems sollte nur vom behandelnden Arzt entfernt werden.